


2.8. Contrôle qualité des empreintes

Insertion du protège-tympan


Le protège-tympan doit être placé juste après le deuxième coude du canal de l'oreille.

Si l'empreinte est trop courte, le canal auditif peut être bloqué.

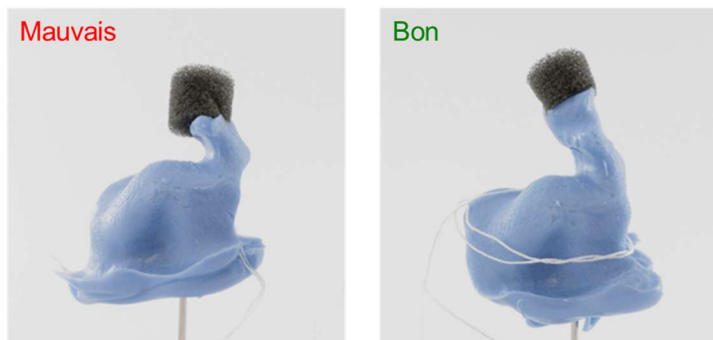

Le canal de l'oreille doit être complètement rempli

Lorsque le protège tympan est placé après le deuxième coude et l'empreinte extraite, le deuxième coude doit être entièrement visible.

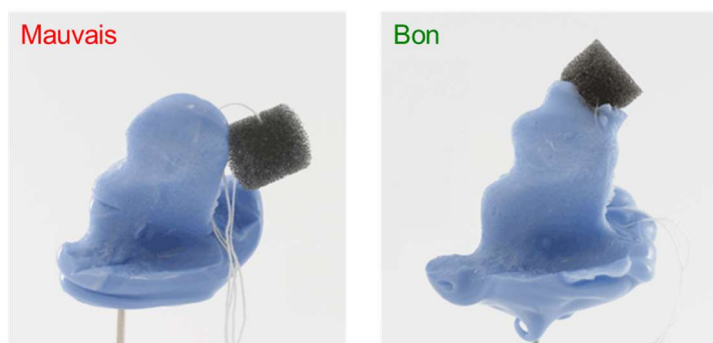


La pâte à empreinte doit complètement avoir durci.

La pâte à empreinte doit avoir totalement durci avant de retirer l'empreinte de l'oreille.

Autrement, l'empreinte pourrait être déformée. La pâte doit également être mélangée uniformément.

Si ce n'est pas le cas, l'empreinte ne sera pas uniforme en couleur.

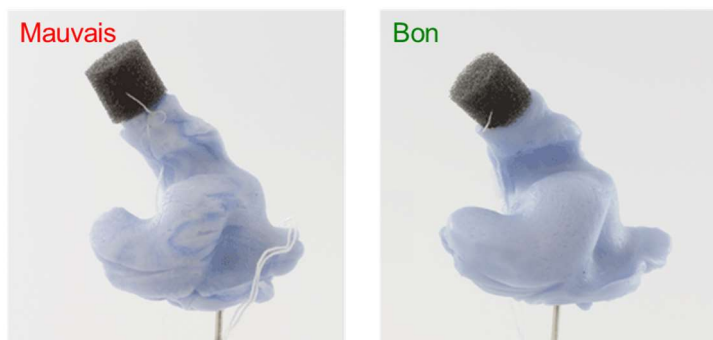


Vérifiez que la surface de l'empreinte est lisse et ne présente pas de manqué`

L'empreinte ne doit pas présenter de bulles.

Évitez systématiquement les bulles d'air et les irrégularités.

Signalez une forme anormale de l'oreille sur le rapport d'intervention.

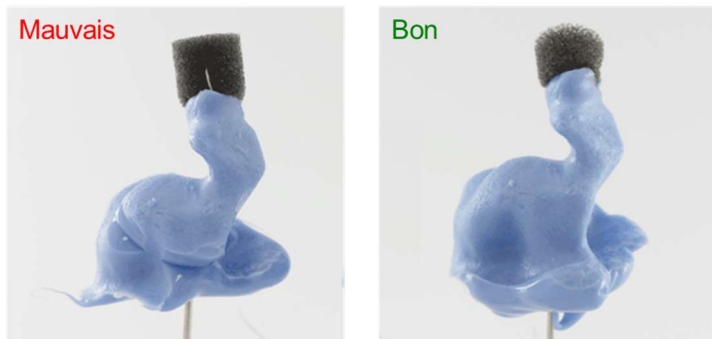

Le tragus et antitragus doivent être complètement remplis.

Le tragus et antitragus doivent être complètement visibles et il doit y avoir suffisamment de pâte pour retirer l'empreinte de l'oreille. Le mieux est de faire une empreinte pleine.

